

DA 7000



Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Kezelési utasítás

Navodila za uporabo



Import, servis:

V - NET s.r.o.
Šumice 139
687 31 Šumice
Czech republic
tel.: +420 572 639 076
prodej@v-net.cz
IČO: 26966034,
DIČ: CZ26966034
www.promile.cz

Digitální detektor alkoholu DA 7000

CZ

Návod k obsluze



Jednotlivé části detektoru

1. Náustek
2. Svítilna
3. Displej
4. Tlačítko MODE
5. Výstup dechu - nezakrývejte při zkoušce
6. Tlačítko START

Detekce alkoholu

1. Stisknete tlačítko „START“. Na displeji se zobrazí počet provedených měření a poté „ALCo“.
2. Stisknete ještě jednou tlačítko „START“. Detektor začne na displeji odpočítávat číslice až po 000. Během této doby se zahřívá senzor v detektoru a celý přístroj se připravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20 sekund.
3. Jakmile uslyšíte pípnutí tak ihned po tomto signálu foukejte rovnoměrně do náustku, dokud budete slyšet zvukové znamení (asi 4 sekundy). Po pípnutí přestaňte foukat do detektoru. Pokud jste foukali krátkou dobu, na displeji se zobrazí „Flo“ – měření opakujte.
4. Asi za 4 sekundy se na displeji zobrazí výsledek testu. Údaje jsou udávány v promile.
5. Po zobrazení naměřených údajů (4 sekundy) se detektor sám vypne. Nelze vypnout tlačítkem „START“.
6. Měření je nutné provést do 10 sekund od doby, kdy je detektor připraven k měření (bod č. 2,3), jinak se na displeji zobrazí „Out“.

Použití svítilny

1. Stisknete tlačítko „START“. Na displeji se zobrazí počet provedených měření a poté „ALCo“.
2. Stisknete tlačítko „MODE“ a na displeji se zobrazí „F59,9“, což znamená, že svítilna se automaticky vypne za 59,9 minut. Časovač se vypne stisknutím tlačítka „START“. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka časovač zase zapnete.
3. Svítilnu zapnete a vypnete pomocí tlačítka „MODE“.
4. Funkce nouzového signálu (svítilna bliká): Pokud stisknete tlačítko „START“ v délce trvání 3 sekundy v době, kdy je svítilna zapnutá, pak spustíte nouzový signál (svítilna bliká). Tento signál vypnete stisknutím tlačítka „MODE“.

Důležitá upozornění

1. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
2. Čidlo detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte alespoň dvě minuty. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným vzduchem (kouř, alkohol). Nelijte ani nijak nevpravujte žádnou tekutinu do detektoru, můžete zničit čidlo detektoru.
3. Všeobecně snímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Proto se mohou vyskytnout mírné nepřesnosti měření. Nevystavujte detektor extrémním teplotním a klimatickým vlivům.
4. Pokud jste detektor delší dobu nepoužili, mohou být první tři měření nepřesná.

Specifikace

Rozměry: 58 x 123 x 24 mm
Hmotnost: 114g
Typ senzoru: polovodičové čidlo
Čas přípravy k měření: 20 sek
Čas reakce: 5 sek
Baterie: 2x 1,5V AA alkalická
Rozsah měření: 0,00 – 4,00 promile
Provozní teplota: +5 - +40°C
Přesnost: +/- 10%

Kalibrace

Kalibrace je postup, při kterém se detektor nastavuje tak, aby jím naměřené hodnoty koncentrace alkoholu přesně odpovídaly koncentracím alkoholu v laboratorním kalibračním etalonu. Pro správnou činnost detektoru se doporučuje jej kalibrovat minimálně každých 6 měsíců.

Kalibrace detektoru není z hlediska záručních podmínek považována za opravu. Závady v záruční době a délka záruky se nemění. Nedodržení kalibračních intervalů je porušením záručních podmínek.

Digitálny detektor alkoholu DA 7000

SK

Návod na obsluhu



Jednotlivé části detektora:

1. Náustok
2. Svítlna
3. Displej
4. Tlačítko MODE
5. Výstup dychu - nezakrývajte pri skúške
6. Tlačítko START

Detekcia alkoholu

1. Stlačte tlačítko „START“. Na displeji sa zobrazí počet vykonaných meraní a potom „ALCo“.
2. Stlačte ešte raz tlačítko „START“. Detektor začne na displeji odpočítavať číslice až po 000. Behom tejto doby sa zahrieva senzor v detektore a celý prístroj sa pripravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20 sekúnd.
3. Akonáhle budete počuť pípnutie tak ihneď po tomto signále fúkajte rovnomerne do náustku dokiaľ budete počuť zvukové znamenie (asi 4 sekundy). Po pípnutí prestaňte fúkať do detektora. Pokiaľ ste fúkali krátku dobu, na displeji sa zobrazí „Flo“ – meranie opakujte.
4. Asi za 4 sekundy sa na displeji zobrazí výsledok testu. Údaje sú udávané v promilách.
5. Po zobrazení nameraných údajov (4 sekundy) sa detektor sám vypne. Nieje možné ho vypnúť tlačítkom „START“. Meranie je nutné vykonať do 10 sekúnd od doby, kedy je detektor pripravený k meraniu (bod č. 2,3), inak sa na displeji zobrazí „Out“.

Použitie svítilny

1. Stlačte tlačítko „START“. Na displeji sa zobrazí počet vykonaných meraní a potom „ALCo“.
2. Stlačte tlačítko „MODE“ a na displeji sa zobrazí „F59,9“, čo znamená, že svítilna sa automaticky vypne za 59,9 minút. Časovač sa vypne stlačením tlačítka „START“. Opätovným stlačením tohoto tlačítka časovač zase zapnete.
3. Svítilnu zapnete a vypnete pomocou tlačítka „MODE“.
4. Funkcia núdzového signálu (svítilna bliká): Pokiaľ stlačíte tlačítko „START“ v dĺžke trvania 3 sekundy v dobe, kedy je svítilna zapnutá, potom spustíte núdzový signál (svítilna bliká). Tento signál vypnete stlačením tlačítka „MODE“.

Dôležité upozornenie:

Detektor DA 7000 je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientovaný meradlom alkoholu. Nie je možné ho použiť na dokazovanie a z merania vyvodzovať napr.pracovno-právne dôsledky.

Počkajte najmenej 30 minút po konzumácii alkoholu pred používaním detektora alkoholu. Budete mať istotu, že vzorka alkoholu je odobraná len z vašich pľúc a nie zo zvyšku alkoholu vo vašich ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty

1. Čidlo v detektore je vysoko citlivé, nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití alkoholu. Počkajte aspoň dve minúty. Dym alebo alkohol môže zničiť čidlo detektora. Nepoužívajte detektor v silnom vetre alebo v miestnosti so silne znečisteným vzduchom. Nelejte ani nijak inak nevpravujte žiadnu tekutinu do detektora, môžete zničiť čidlo detektora.

2. Všeobecne snímače alkoholu ovplyvňuje teplota a vlhkosť vzduchu. Preto sa môžu vyskytnúť mierné nepřesnosti merania. Nevystavujte detektor extrémnym teplotným a klimatickým vplyvom. Prevádzková teplota je +10 - +40 °C.

3. Pokiaľ ste detektor dlhšiu dobu nepoužili, môžu byť prvé tri merania nepřesné.

Špecifikácia

Rozměry: 58 x 122 x 22 mm
Hmotnosť: 115g
Typ senzora: polovodičové čidlo
Čas prípravy k meraniu: 20 sek
Čas reakcie: 5 sek
Batéria: 2x 1,5V AA alkalická
Životnosť batérie: 200 – 300 meraní
Rozsah merania: 0,00 – 4,00 promile
Prevádzková teplota: +10 - +40°C
Přesnosť: +/- 10%

Kalibrácia

Kalibrácia detektora sa doporučuje po 6 mesiacoch. Kalibrácia vykonáva dovozca detektora.

